



# CIRCUIT RESPIRATOIRE REUTILISABLE POUR I.P.V.®



## A50095-1—Réutilisable

Pièce essentielle dans la Ventilation à Percussion Intrapulmonaire.




Le Circuit Respiratoire se compose de 3 Parties :

1. Phasitron®—Circuit Respiratoire « Proprement dit », Seul Circuit Respiratoire en Permanence Ouvert sur les 2 temps de la Ventilation des Patients ;
2. Le Générateur D'Aérosol Pneumatique qui s'adapte sur la porte Inspiratoire du Phasitron® qui grâce à l'effet Venturi et l'effet d'entraînement de ce dernier permet une meilleure humidification des voies aériennes et l'administration d'aérosol médicamenteux — taille des particules 3 microns.
3. Le Harnais 4 Couleurs Spécifique qui est le conducteur des fluides sous pression de la machine au patient.

Le Phasitron® et le Générateur d'Aérosol sont autoclavables à 121° pendant 20mn, à 125° pendant 19mn, à 134° pendant 18mn.

Le Harnais passe au lave instrument à 100°.

- Poids : 417 g
- Réutilisable ;
- Stérilisable, Autoclavable
- Adaptable sur Masque Buccal, Nasobuccal ou nasal sans Fuite Adulte ou Pédiatrique ;
- Adaptable à l'embout buccal plat ou rond ;
- Adaptable sur Sonde D'Intubation Nasale ou Endotrachéale ;
- Adaptable sur Trachéotomie.
- Apport O2 possible ;
- Marquage FDA et CE 0344 KEMA
- Matériel fabriqué aux U.S.A.. Par Percussionaire® Corporation

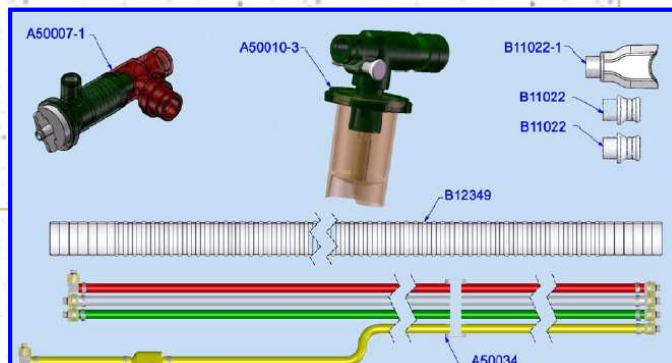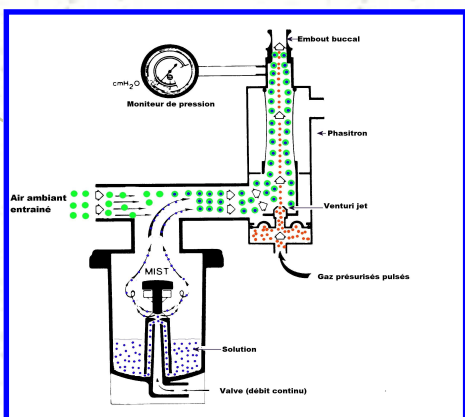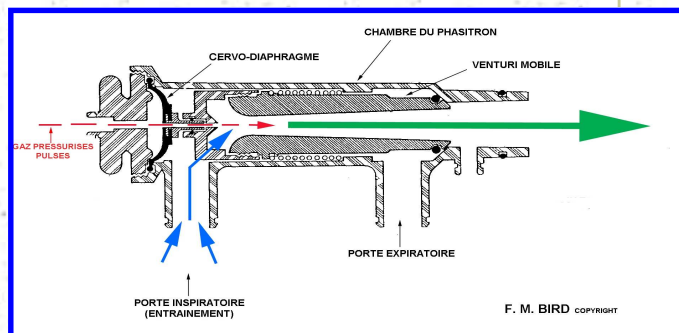

Personne à contacter : 04 93 20 70 47  
SARL I.M.A.Pe®  
MARINA BURO—1752 RN7  
06270 VILLENEUVE LOUBET

# **A50095—Circuit Respiratoire I.P.V.®**

DESCRIPTION	REFERENCE	QUANTITE
PHASITRON ®	A50007-1	1
GENERATEUR AEROSOL COMPLET	A50010-1	1
HARNAIS 4 COULEURS SPECIFIQUE sans Filtre	A50034	1
EMBOUT BUCCAL PLAT REUTILISABLE	B11022-1	1
EMBOUT BUCCAL ROND REUTILISABLE	B11022	2
RACCORD ANNELE TRANSPARENT	B12349	1

## RECOMMANDATIONS CONSTRUCTEUR

**IL EST RECOMMANDE DE STERILISER LE PHASITRON® et le GENERATEUR d'AEROSOL DEMONTES.**

**REGULIEREMENT APRES CHAQUE STERILISATION de PASSER de la SILICONE avec le STICK prévu a cet effet sur les JOINTS TORIQUES des QUICK de CONNEXIONS RAPIDES du HARNAIS, du POT JAUNE du GENERATEUR D'AEROSOL et sur le CERVO-DIAPHRAGM du VENTURI MOBILE afin de conserver le bon fonctionnement de Circuit respiratoire.**

## PIECES DETACHEES :

Certaines pièces sont changeables :

CERVO-DIAPHRAGM	B10918
JOINTS TORIQUES VENTURI MOBILE—.485 ID X .105— Sachet de 10 Pièces	B10968-10PK
RESSORT VENTURI MOBILE—1.175 X 900	B10916
VENTURI MOBILE COMPLET	A50014
COIFFE PHASITRON®	B10914
CORPS DU PHASITRON®	A500008-1
CAPOT DU GENERATEUR D'AEROSOL avec BOUTON de Commande	A50015-1
CUVE DU GENERATEUR D'AEROSOL Complète	A50087
JOINT TORIQUE DE LA CUVE DU GENERATEUR D'AEROSOL— Sachet de 10 Pièces	B11059—PK
CONNEXIONS RAPIDES DROITES DU HARNAIS 4 COULEURS—Sachet de 10 Pièces	A50041-10PK
CONNEXIONS RAPIDES COUDES DU HARNAIS 4 COULEURS Sachet de Pièces	A50042—10PK
CONNEXIONS RAPIDES FEMELLES POUR HARNAIS Sachet de 10 Pièces	B10925—10PK
FILTRE HYDROPHOBE ANTIBACTERIEN LIGNE ROUGE sans Harnais	B12711
FILTRE HYDROPHOBE ANTIBACTERIEN LIGNE ROUGE avec Harnais et sas connexions	A99509
BATON de SILICONE Traitement Préventif	A50060
JOINTS TORIQUES CONNEXIONS RAPIDES du HARNAIS 4 Couleurs Sachet 10 Pièces	B10526-10PK

**S.A.R.L I.M.A.Pe® - MARINA BURO - 1752 RN7 - 06270 Villeneuve Loubet  
Tel : 04 93 20 70 47 - Fax : 04 93 20 72 48 - Email : imap.vienne@wanadoo.fr**